

[製品情報]



フリースタイルプレシジョンネオ™

承認番号: 22600BZX00343000

製品番号	71386-80
JANコード	4987439081328
包装単位	1台
希望小売価格	13,500円(税抜)

測定原理	電極法
血糖測定範囲	20～500mg/dL
血糖測定時の必要検体量	0.6μL
血糖測定時間	5秒
ヘマトクリット値	30～60%



FSプレシジョン血糖測定電極*

承認番号: 22600AMX01286000

製品番号	80224-75
JANコード	4987439081335
包装単位	30枚
希望小売価格	4,440円(税抜)

製品番号	99619-75
JANコード	4987439081342
包装単位	25枚
希望小売価格	3,700円(税抜)



β-ケトン測定電極Ⅲ*

承認番号: 22300AMX00567000

製品番号	99623-75
JANコード	4987439081359
包装単位	10枚
希望小売価格	5,500円(税抜)

*本品は FreeStyle リブレ及びフリースタイルプレシジョンネオ用の電極です。

[関連製品情報]



ポケットランセット™ オレンジ

承認番号: 221AFBZX00013000

深さ0.5mm (30ゲージ)			
製品番号	70505-96	製品番号	70505-97
JANコード	4987439076607	JANコード	4987439076614
包装単位	26本	包装単位	31本
希望小売価格	650円(税抜)	希望小売価格	775円(税抜)



ポケットランセット™ ブルー

承認番号: 221AFBZX00013000

深さ0.8mm (30ゲージ)			
製品番号	70505-93	製品番号	70505-94
JANコード	4987439072371	JANコード	4987439072388
包装単位	26本	包装単位	31本
希望小売価格	650円(税抜)	希望小売価格	775円(税抜)



ポケットランセット™ イエロー

承認番号: 221AFBZX00013000

深さ1.25mm (30ゲージ)	
製品番号	70505-95
JANコード	4987439072395
包装単位	31本
希望小売価格	775円(税抜)



自己検査用グルコース測定器

フリースタイルプレシジョンネオ™

より良い血糖コントロールを目指して



ISO15197 : 2013 分析性能基準適合

お客様
相談窓口

0120-37-8055

営業時間 8:00-20:00(平日)、8:00-17:00(祝日) ※土日除く

[フリースタイルプレシジョンネオ™ /
FSプレシジョン血糖測定電極 /
β-ケトン測定電極Ⅲ: 製造販売元]

アボットジャパン合同会社
千葉県松戸市松飛台 278

[ポケットランセット™: 製造販売元]

株式会社 旭ポリスライダー
岡山県真庭市三崎 860-2

[ポケットランセット™: 製造販売元]

アボットジャパン合同会社
本社 / 東京都港区三田 3-5-27



ADC-18770 03/20



血糖目標値の設定は必ず医師の指導のもとで行なってください。




より良い血糖コントロールのために




血糖インジケーター機能

患者さん個々の血糖目標値*に合わせて、低血糖・高血糖をお知らせ

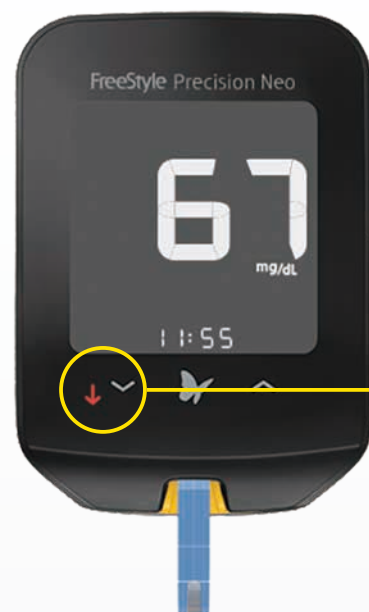

【低血糖時】

過去5日間の同一時間
(±3時間以内)に低血
糖が2回計測された際
に↓が点滅

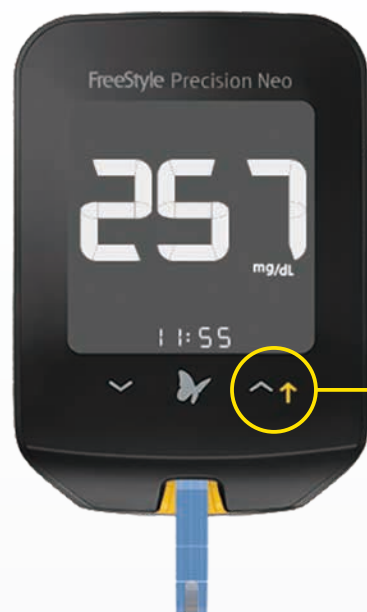

【高血糖時】

過去5日間の同一時間
(±3時間以内)に高血
糖が3回計測された際
に↑が点滅

*患者さん個々に応じた目標値を設定可能(初期値:70~240mg/dL)

インスリン投与ログ機能



インスリン投与記録をチェッ
クボックスの□部分を押すだ
けでかんたんに登録

インスリン投与単位数は、
かんたん操作で変更可能

インスリン投与タイミングは、
アイコン操作でかんたんに登録
可能

インスリン患者さんのために



大きく見やすい画面

E Inkテクノロジーにより、
目に優しく見やすい表示と省電力を実現



点着しやすい電極


先端点着に加え、手の震える患者さんにも
点着しやすい上部点着も可能

高い正確性

ISO15197:2013の分析性能基準に適合

ISO15197:2013の分析性能に対する試験に
より、許容基準を満たすデータが確認されて
います。

また、グルコースに高い特異性を持つ酵素と
低電圧で作用する電子伝達体の組み合わせに
より、マルトースやパムを含む干渉物質の影
響を受けにくいことが確認されています。

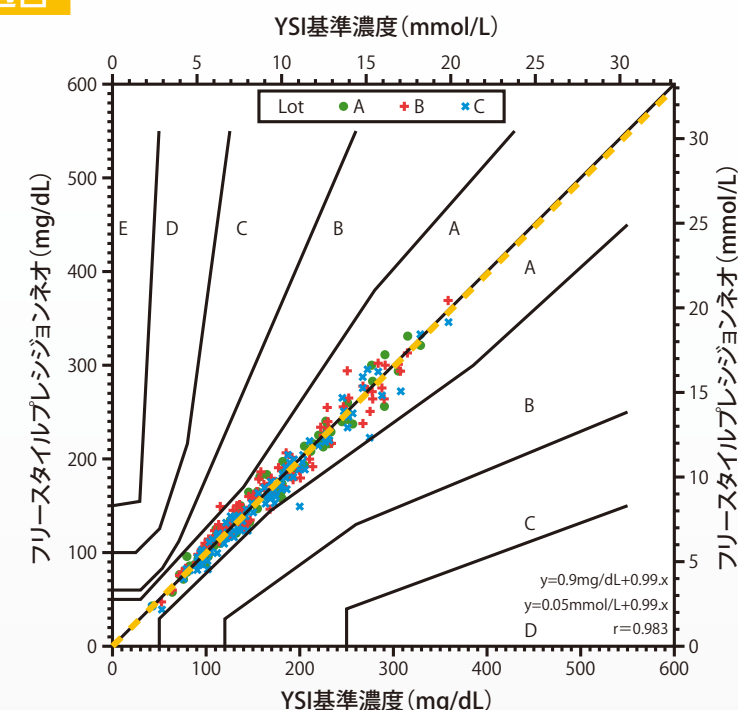

※社内資料

データ管理ソフト

FreeStyle Auto-Assist Neo 仕様

【システム要件】2015年4月現在

- ▶ Microsoft Windows 7 (32ビットまたは64ビット)
- ▶ Microsoft Windows 8 および8.1 (32ビットまたは64ビット)
- ▶ Microsoft Windows XP (サービスパック3)

- 接続には測定器本体に付属のケーブルをご使用ください。
- USB2.0ハブ、2.4GHzデュアルコアプロセッサ、2GB RAM以上が搭載されたコンピュータが必要です。
PDF形式のレポートを表示するため、Adobe® Readerが推奨されます。
- 測定器データのコンピュータへの保存は、PDF形式(レポート画面)もしくはテキストファイル形式でのみ行なうことができます。本ソフトウェア内には記録されません。

インストール方法は弊社担当者へご確認ください

