

アプリのダウンロード方法

アプリストアで検索するか、二次元コードよりWebサイトにアクセスし、ダウンロードしてください。

※アプリの使用にあたってはWi-Fiまたはモバイル回線に接続可能な端末が必要です。
※最新のスマートフォン推奨環境は弊社Webサイトにてご確認ください。

リブレLinkUp

リブレLinkUp 🔍 検索



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう



よくあるお問い合わせ

リブレLinkUpのデータに基づいて 患者さんの治療方針を 決めることはできますか？

リブレLinkUpのデータは治療方針やお薬の投与量を
決めるものではありません。患者さんの治療方針は、
主治医の指示に従ってください。

リブレLinkUpでは、 複数のFreeStyleリブレLinkのユーザーと データを連携できますか？

リブレLinkUp、FreeStyleリブレLink、それぞれ最大20人
と連携し、データを共有することができます。

リブレLinkUpは、 医療従事者の方も使用できますか？

リブレLinkUpは、患者さんご家族向けのアプリであり、
医療従事者の方が使用することを目的としていません。
患者さんが医療従事者の方とデータ共有したい場合は、
リブレViewと連携してください。

リブレLinkUpでは、FreeStyleリブレLinkで スキャンした測定データを どのくらいの時間で確認できますか？

双方のインターネットの接続環境やネットワーク速度
などにより異なりますが、通常は数秒以内にデータを
確認することができます。



「FreeStyleリブレ」をご使用の患者さん向けに
サポートサービスFreeStyleリブレケアを
ご用意しています。
詳しくはWebサイトよりご確認ください。



リブレケア 🔍 検索

FreeStyleリブレ 製品情報サイト

<https://www.myFreeStyle.jp/>

フリースタイルリブレ 🔍 検索



お客様相談窓口



0120-37-8055

[営業時間 8:00～20:00(平日)、8:00～17:00(祝日) ※土日除く]

本社：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
千葉県松戸市松飛台 278
販売名：FreeStyleリブレ 承認番号：22800BZX00212000




life. to the fullest.®

Abbott

FreeStyleリブレLinkを使用中の患者さんご家族の方へ

リブレLinkUp

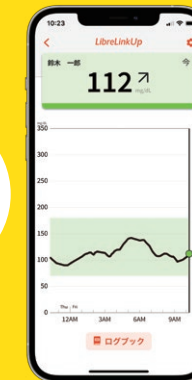

測れば変わる。 センサーから始まる 新しい生活。

FreeStyleリブレLinkをご使用の患者さんのグルコース値やトレンドを
ご家族が確認できるスマートフォンアプリ「リブレLinkUp」。
ご家族と患者さんをつなげ、離れていても、
患者さんの糖尿病管理をサポートすることができます。



life. to the fullest.®

Abbott

FreeStyleリブレLinkとリブレLinkUpで、患者さんにご家族につながる安心を

ご家族と一緒にいつでも血糖変動を確認できるから、患者さんは安心して 糖尿病の自己管理に取り組むことができます。


リブレLinkUpの特徴



ご家族
向け

リブレLinkUp

リブレLinkUpは、FreeStyleリブレLinkをご使用の患者さんのグルコース値やトレンドを、ご家族が確認したり、お知らせ通知を受信したりできるスマートフォンアプリです。

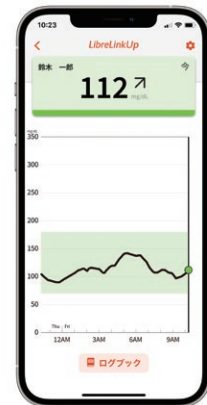


リモートモニタリング

患者さんの 現在および過去12時間のグルコース値をグラフで確認することができます。



お知らせ通知

患者さんがFreeStyleリブレLinkでスキャン※1すると、ご家族あてに測定したグルコース値の通知が届きます。

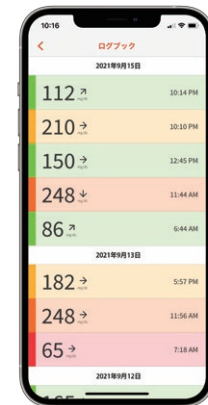

履歴確認

直近14日間のログ(グルコース値のスキャン結果、グルコース値のトレンド矢印)を確認することができます。

ご家族がリブレLinkUpを使用するにあたって、最初に患者さん側でFreeStyleリブレLinkから連携の設定を行ってください。



患者さん
向け

FreeStyleリブレLink




FreeStyleリブレLinkでの連携方法※2,3



FreeStyleリブレLinkメニュー画面から「アプリ連携済み」を選択します。



「リブレLinkUp」の「連携する」ボタンをタップします。

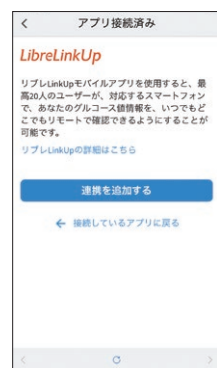

「連携を追加する」ボタンをタップします。



連携を希望するご家族の氏名とメールアドレスを登録します。



連携を希望するご家族に招待メールを送信します。


リブレLinkUpの初期設定方法



「今すぐ始めましょう」より登録を開始します。



「国/地域」を選択します。

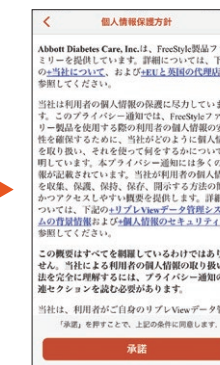

「個人情報保護方針」を確認、承諾します。



氏名、生年月日、メールアドレス、パスワードを入力し、アカウントを作成します。



登録したメールアドレスあてにメールが届きます。



(メール画面) メールアドレスを確認します。「メールアドレスの確認に成功しました」の表示が出ればサインアップ完了です。



アプリに戻り、登録した氏名が正しく表示されているか確認します。



グルコース値の通知の受信を希望する場合は「許可」を選択します。設定は後で変更することができます。



患者さんからのデータの連携の希望を「承諾」します。



「まだ連携がありません」と表示される場合は、患者さんに招待を依頼してください。

※1 FreeStyleリブレLinkでスキャンしたデータは、クラウドベースの糖尿病管理システム リブレViewにアップロードされ、リブレLinkUpに連携されます。

※2 FreeStyleリブレLinkのユーザーが未成年の場合は、保護者がパスワードを入力する必要があります。

※3 FreeStyleリブレLinkのユーザーが既にリブレViewに登録している場合は、登録しているアカウントと同じメールアドレスをご入力ください。