

1 データアップロード

- 1 測定器を専用USBケーブルでPCへ接続し、左上の「測定器をアップロード」のアイコンを選択し、画面上より「患者レポートを作成」を選択します。

※クラウド上で患者さん情報と紐づけずにレポートを確認したい場合は、「1回限りのレポートの作成」を選択してください(この場合、アップロードされたデータは患者個人の情報を含まず、24時間で自動消去されます)。



- 2 「LibreViewDeviceDriversを開きますか?」の表示が現れますので、「開く」を選択してください。

※チェックボックスを選択しておけば、次回以降は表示されません。




- 3 「測定器を検索しています」の表示画面となります。

※10~20秒程度かかる場合がございます。




- 4 どの患者さんに紐づけてデータをアップロードするか選択します。

※一度患者さんとの紐づけが完了すれば、次回以降は測定器のシリアル番号から自動的に判別され、選択不要となります。

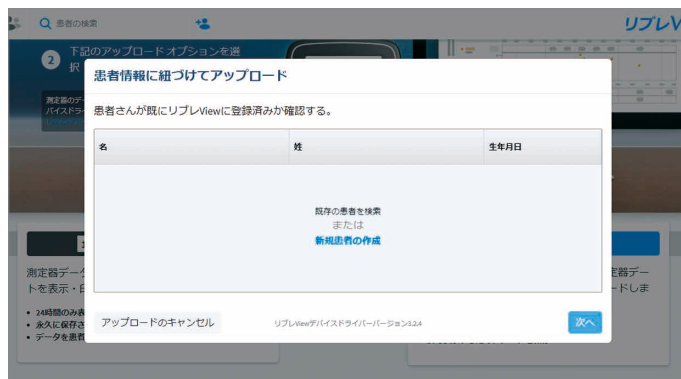

登録済み患者さんの場合

- 5 「姓」の右上にカーソルを合わせると表示される「虫眼鏡」のアイコンをクリックします。

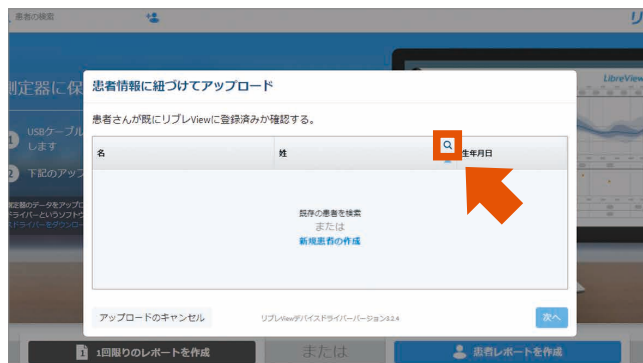

- 6 入力ボックスが開きますので、検索したい「患者さんの姓」を入力してください。該当する患者さん名の候補が表示されますので、その中より選択します。

※新しい測定器に交換した場合、改めて患者さんとの紐づけが必要です。



初めて登録する患者さんの場合

- 5 「新規患者の作成」をクリックし、必要な患者さん情報(氏名、生年月日)を入力し、「保存」を選択して完了ください。

※「医療プラクティスの選択」で「プライベート」を選ぶと、他の医療プラクティスメンバーへ患者さんデータは共有されません。

※患者さんのデータを登録される際は、患者さんの同意を確認頂くようお願い致します。




- 7 読み込みが完了すると「グルコース値の履歴」画面が表示されます。



2 レポート印刷・保存

1 左上2番目の「患者ダッシュボード」のアイコンをクリックし、患者さんの一覧より、レポートを出力したい患者さんを選択しクリックします。

※検索したい場合は、「姓」の項目をクリックすると表示される入力ボックスから検索も可能です。

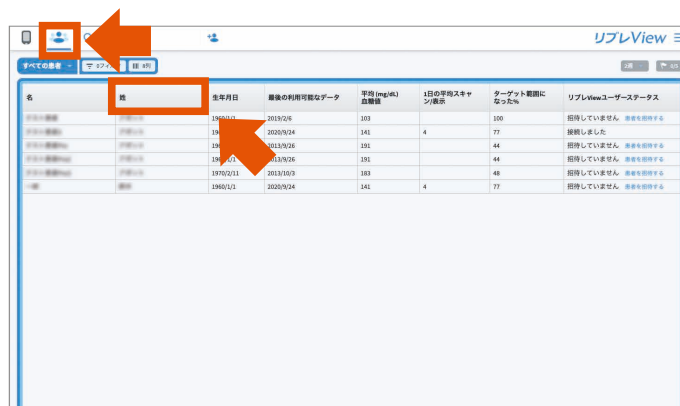

2 左側のメニューより「グルコース値の履歴」を選択。その後、画面右側に見える「グルコース値のレポート」をクリックします。




3 画面下の「レポート設定」の項目より、出力したいレポートの選択、期間、また閾値の変更等の設定が可能です。

※保存した設定内容は、次回以降もこの患者さんに適用されます。
※全ての患者さんの設定を変更したい場合は、メイン画面右上「メニュー」>「レポート環境設定」より設定下さい。



4 「レポート設定」で選択したレポートが表示されます。印刷・保存したい場合は、右下の「PDFの印刷・保存」をクリックし、印刷または保存を実行してください。

※複数の測定器を利用している場合、画面下「データソース」の項目より、必要ない測定器を選択解除して、レポート対象を変更してください。

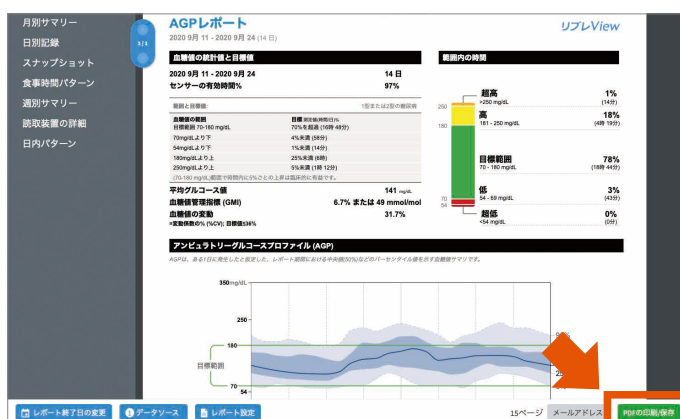

③ 患者さんとのデータ連携

患者さんとのデータ連携を設定すると、患者さんのご自宅PCからアップロードされたデータが確認できるようになります。
下記2通りの方法から選択ください。

医療プラクティスIDによる認証

- 画面右上「設定メニュー」より「私の医療プラクティス」を開き、設定した「医療プラクティス」を選択します。




- 画面左メニュー「概要」ページ内にある「患者とつながる」に記載の「医療プラクティスID」を患者さんに伝達します。

※患者さん側の設定は、別途「患者さん向けご利用資料」をご参照ください。



招待メールによる認証

- 「患者ダッシュボード」よりデータ連携したい患者さんを選択し、「プロフィール」画面に表示される「患者さんを招待する」を選択します。

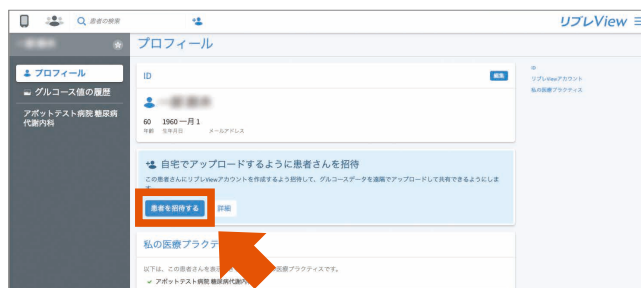

- 表示される患者さん情報を確認のうえ、「メールアドレス」を入力し「保存」すると、データ共有のための招待メールが送信されます。

※「患者ダッシュボード」あるいは「患者さんプロフィール」の画面より、承認状況を確認出来ます。

