


# FreeStyleリブレProをお使いの患者さんへ



上腕後部に装着されたセンサーは  
最長14日間そのままにしてください。  
センサーの取り外しおよび再装着はしな  
いでください。外れた場合は主治医（医  
療機関）に連絡してください。

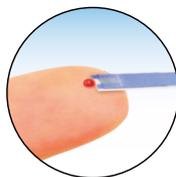

血糖自己測定は継続してください。  
主治医から指示されている血糖自己測定  
と記録は通常どおりに行ってください。



装着中はセンサーが外れないようにご注意ください。



ドア、家具、人、その他に  
センサーをぶついたり  
引っ掛けたりしないよう  
注意してください。



からだを洗ったり、拭いたり  
するときに、センサーを引っ掛けたり  
引っばったりしないようにしてください。  
※水深1メートルより深いところにセンサーを入れ  
たり、30分以上水に浸したりしないでください。



センサーや粘着剤を触る、  
押す、引っばるなどは  
しないでください。



センサーが外れるおそれがあるため、  
腕周りがピッタリした服は  
避けてください。



衣服の着脱時にセンサーを  
ぶついたり引っ掛けたり  
しないよう注意してください。



体が接触するスポーツや  
センサーが外れるおそれのある  
激しい運動は避けてください。

次のような場合は、主治医(医療機関)に連絡してください。

- ・ センサーが外れた場合（外れたセンサーは捨てずに保管してください。外れたセンサーにもグルコース値のデータが保存されている可能性があります。）
- ・ センサー装着部に刺激感や不快感がある場合。
- ・ センサーについて質問などがある場合。



FreeStyle  
リブレPro

<https://www.myfreestyle.jp/>

お客様  
相談窓口  [adc-cs.jp@abbott.com](mailto:adc-cs.jp@abbott.com)  
 0120-37-8055

アボットジャパン合同会社



life. to the fullest.®

Abbott