


FreeStyle
リブレLink

112  mg/dL

詳細な血糖トレンドを解明し、
より良い糖尿病管理につなげる

測ればわかる。
わかれば変わる。




 **Abbott**
life. to the fullest.®

糖尿病の自己管理をさらに簡便に



FreeStyleリブレLinkアプリとスマートインスリンペンとのデータ連携により、インスリン投与データを一括取り込みが可能に。

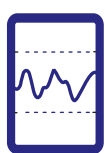


手動入力による手間や記録漏れをなくし、より簡便なデータ管理を実現します。



連携される正確なインスリン投与量に基づく診療や投与管理に活用いただけます。

* FreeStyleリブレLinkはFreeStyleリブレセンサーとともに使用でき、またノボペン®6およびノボペンエコー®プラスと互換性があります。

* 一部機種 (例: iPhone7など) によっては、データ転送ができない場合があります。(2022年9月現在)

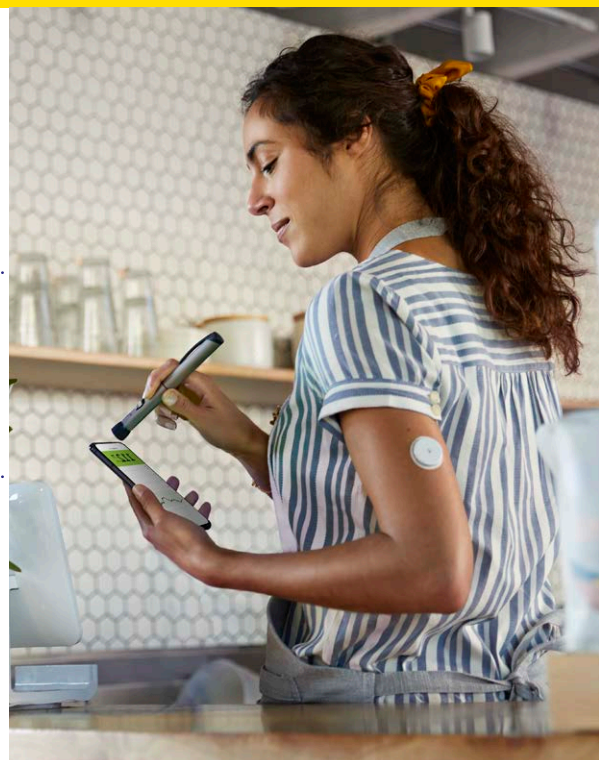

スマートインスリンペンから連携されたインスリン投与量データはアプリやリブレViewで確認でき、血糖トレンドとの統合的な管理が可能になります。

FreeStyle リブレLink 

リブレView



データ連携

互換性のあるスマートインスリンペンをスキャンして追加し、インスリン投与量をアプリに転送します。



データ確認

アプリで過去のインスリン投与量とグルコース測定値を確認出来ます。




データ共有

医療従事者へデータ共有すると、リブレView上のレポートで、正確なインスリン投与量とその影響を把握して診療にご活用頂けます。

* 「Apple」、「iPhone」および「App Store」は、Apple Inc.の商標です。

* 「Android」はGoogle LLCの商標です。

スマートインスリンペンと連携方法

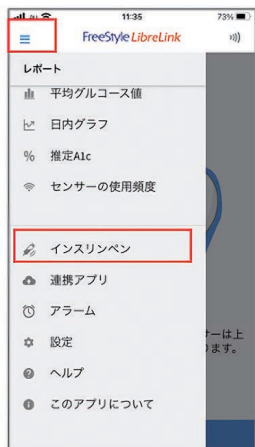

1 左上のメニューを開き
インスリンペンを選択



2 始めましょうを選択

表示されるガイダンスに沿って
以下の設定で完了です。

- インスリンペンを選択
- インスリンペン进行スキャン
- 色や種類などを選択
- インスリンペンメーカーに対するデータ共有の同意 (任意オプション)



詳細な使用方法

- 詳細な使用方法是、FreeStyle リブレLink アプリ内メニューより「インスリンペンの取扱説明書」をご参照ください。
- FreeStyle リブレLink アプリと互換性のあるスマートインスリンペンの最新情報は、上記アプリ内取扱説明書、あるいはWebサイトにてご確認いただけます。



お問い合わせ

ノボペン®に関する不明な点は、ノボ ノルディスクファーマ株式会社の下記カスタマーセンターへお問い合わせください。

ノボケア
相談室

月曜日から金曜日 (祝日・会社休日を除く)

☎ 0120-180363

夜間及び土日・祝日・会社休日

※お問い合わせ内容によっては、翌営業日に回答させていただきます。

☎ 0120-359516

FreeStyleリブレはデジタルヘルスツール提供を通じて、より良い糖尿病治療に貢献します



見える

患者さんはいつでも、どこでも、より自然にグルコース値を測定して血糖トレンドが見えます。



わかる

クラウド上で、「行動に結び付く分かりやすいレポート」を提供し、医療従事者と患者さんをつなぎます。



つながる

患者さんと家族がつながり、家族と一緒に糖尿病自己管理のサポートを行えます。



アプリとスマートインスリンペンのデータ連携も可能に。

アプリのダウンロード

アプリストアで「リブレLink」と検索するか、二次元コードよりアクセスしてください。



<https://www.myFreeStyle.jp/patient/freestyle-libre-link/download.html>

※ご使用には、NFC設定を有効にすることが必要です。

※スマートフォン使用推奨環境に関する情報は、弊社ウェブサイトでご確認ください。



製品情報サイト

フリースタイルリブレ

検索

<https://www.myFreeStyle.jp/>



〔製造販売元〕
アボットジャパン合同会社
千葉県松戸市松飛台 278
販売名: FreeStyleリブレ 承認番号: 228008ZX00212000

お客様相談窓口 **0120-37-8055**

本社
アボットジャパン合同会社
東京都港区三田 3-5-27

営業時間 8:00-20:00 (平日)
8:00-17:00 (祝日)
※土日除く

 **Abbott**
life. to the fullest.®