

アプリ連携の手引き

ノボペン® 6
ノボペン エコー® プラス
×
FreeStyle リブレLink 



※画面はイメージです。

【監修】 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授 **西村 理明先生**

この冊子ではノボペン® 6またはノボペン エコー® プラスのインスリン投与データをFreeStyleリブレLinkアプリに取り込み、医療従事者と共有する方法をご紹介します。

+ インスリン投与データを FreeStyleリブレLinkアプリに取り込む

1 FreeStyleリブレLinkアプリのメニューから「インスリンペン」を選択し、案内に従ってお使いのノボペン®とインスリンを選択。



※画面はノボペン® 6を使用している場合。

2 ノボペン®をスマートフォンにかざして データ転送を実施。

※ノボペン®本体に800回分の投与履歴が保存されるため、毎回のデータ転送は不要。

記録の手間が省ける！



※画面はイメージです。

3 インスリン投与量とグルコース値の履歴を確認。

インスリン投与量と
グルコース値の関係を
確認できる！



※画面はイメージです。



+ インスリン投与データを医療従事者と共有する

1 「医療プラクティスID」を主治医に教えてもらう。

※主治医からメールで招待してもらう方法もあります。




2 FreeStyleリブレLinkアプリのメニューから「連携アプリ」を選択し、リブレViewの「連携する」をタップ。 「医療プラクティスID」を入力し、インスリン投与データを医療従事者と共有。

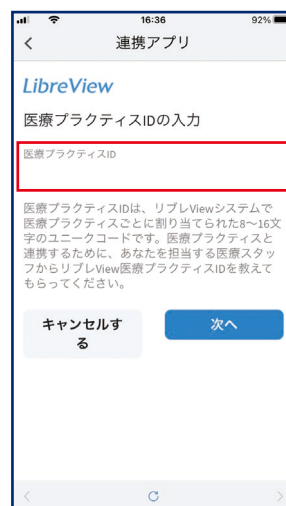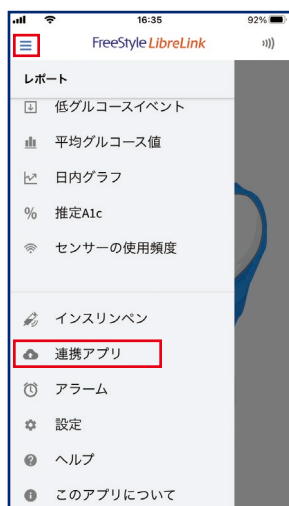


3 医療機関を受診し、共有したインスリン投与データをもとに診察を受ける。

主治医からの質問にも
データを見ながら
簡単に回答できる！

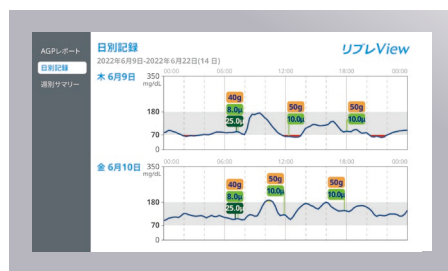

※画面はイメージです。

ノボペン® 6、ノボペン エコー® プラスはインスリン投与の時間と単位を自動で記録し、これまでのインスリン投与の振り返りを可能にします。このインスリン投与データは今後の治療を考えるうえでも重要な役割を果たします。ぜひ医療従事者と共有して、明日からの治療について相談してください。より良いアドバイスがもらえるはずです。

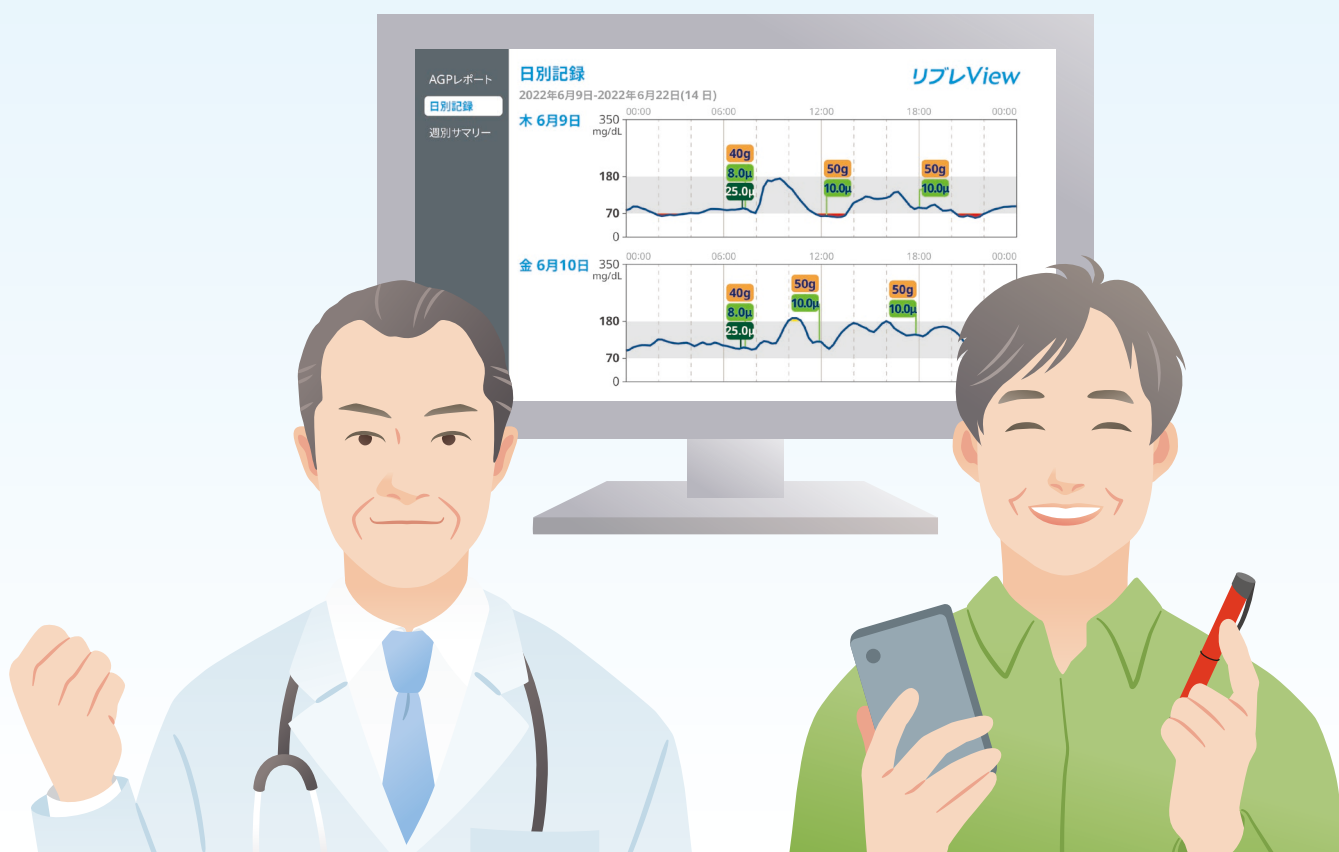

※画面はイメージです。

ノボペン® 6 / ノボペン エコー® プラスに関するお問い合わせ

ノボケア 相談室

平日 9:00～17:00
(祝日・会社休日を除く)
0120-180363
夜間及び土日・祝日・会社休日※
0120-359516

※お問い合わせ内容によっては、翌営業日に回答させていただく場合がございます。

FreeStyleリブレ / FreeStyleリブレLinkに関するお問い合わせ

お客様 相談窓口

平日 8:00～20:00
祝日 8:00～17:00
(土日を除く)
0120-37-8055

製造販売元〈資料請求先〉

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
www.novonordisk.co.jp

〔製造販売元〕

アボットジャパン 合同会社

千葉県松戸市松飛台 278
販売名:FreeStyleリブレ 承認番号:22800BZX00212000
販売名:FreeStyleリブレ 2 承認番号:30300BZX00119000

ADC-84237 v1.0 10/23
(2023年10月作成)